


FX Pet Scan II návod k použití

Gratulujeme, stali jste se majiteli čtečky mikročipů FX Pet Scan II. Tato čtečka umí přečíst všechny **FDX-B & HDX (ISO 11784/85), FDX-A (Destron/FECAVA, Avid/FECAVA) a EM H4102 mikročipy**. Před prvním použitím přístroj nabijte připojením k USB konektoru ve vašem PC, popř. jiném zařízení. Postupujte dle instrukcí v kapitole **Dobíjení baterie**.

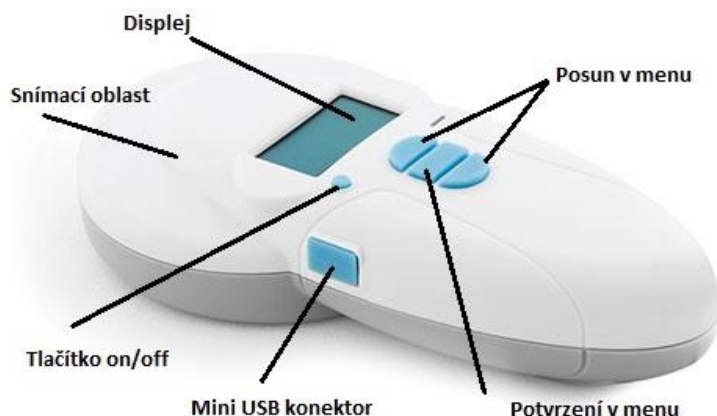

Zapnutí/vypnutí přístroje

Stiskněte tlačítko on/off pro zapnutí přístroje.

Přidržte tlačítko on/off po dobu 3 sekund pro vypnutí přístroje. V případě nečinnosti se přístroj vypne po 3 minutách automaticky.

Čtení kódu mikročipu

Přístroj je zapnutý. Na displeji se objevil text „Scan“. Stiskněte potvrzující tlačítko pro start čtení kódu mikročipu. Na displeji se objeví text „Reading“. Přiložte přístroj na povrch těla zvířete, do oblasti, kde je dle předpokladů implantován mikročip (obvykle levá strana krku) a pohybujte s ním v kruhovém poli. V okamžiku, kdy čtečka detekuje mikročip, jeho číslo se objeví na displeji. V případě, že čtečka mikročip nedetekuje, tato informace se rovněž objeví na displeji.

Dobíjení baterie

Prostřednictvím přiloženého kabelu připojte čtečku konektorem mikro USB ke konektoru USB v počítači nebo v jiném zařízení. Červená dioda signalizuje, že probíhá nabíjení. Plně nabitě zařízení indikuje zelená dioda. Úroveň nabití baterie signalizuje symbol vpravo nahoře na displeji zařízení.

Volba jazyka

Zapněte čtečku. Použijte posunovací tlačítka pro výběr změny jazyka v menu – „Language“. Zmáčkněte potvrzující tlačítko a použijte posunovací tlačítka pro výběr jazyka. Dostupné jazyky jsou angličtina, francouzština, španělština, italština, portugalština, němčina a polština. Po výběru znovu stiskněte potvrzující tlačítko.

Paměť přístroje

Do paměti lze uložit až 1000 kódů mikročipů. Pro aktivaci paměti zapněte přístroj, posunujícím tlačítkem vyberte „Memory“, stiskněte potvrzující tlačítko a posunovacími tlačítky vyberte Enable(zapnutá)/Disable(vypnutá) paměť. Potvrzujícím tlačítkem vyberete jednu z možností. Jakmile je paměť zapnutá a přečtete kód mikročipu, nelze paměť deaktivovat bez přenosu dat. Pro přenos dat znovu stiskněte „Memory“ a na displeji se objeví možnost pro přenos dat „Send“. Stiskněte potvrzující tlačítko a po přenosu dat stiskněte možnost vymazat „Erase“. Nyní, po stisknutí potvrzujícího tlačítka a tím vymazání dat, lze paměť deaktivovat.

Stažení dat

Data s čísly přečtených mikročipů lze zjistit pouze s odpovídajícím softwarem, který Vám na přání poskytneme. Stačí nás kontaktovat na mail: info@naturalpet.cz nebo tel. 606 900 428.

Varování

Přístroj není vodotěsný, mrazu ani horku vzdorný. Používejte v teplotách 0 – 40 °C.

Dotazy směřujte na vašeho prodejce:

Naturalpet.cz
info@naturalpet.cz
tel. 606 900 428